

THE FACE LAB

by **Asclepion**

UN LABORATORIO COMPLETO PER LA CURA DEL VISO.

FaceLab è una piattaforma tecnologica completa che garantisce l'assoluta efficacia dei trattamenti, oltre ad un livello molto elevato di personalizzazione.

FaceLab integra 4 differenti tecnologie in grado di trattare i diversi tipi di pelle:



WATERPEEL



RADIOFREQUENZA



ULTRASUONO



INFRAROSSO



THE FACE LAB

by **Asclepion**

WATERPEEL



Un getto bifasico che crea un'alta pressione sulla cute esfoliandone gli strati superficiali. L'emissione del getto crea canali che permettono ai principi attivi specifici di penetrare negli strati sottostanti, migliorando così gli inestetismi nei diversi strati della pelle.

Inestetismi trattabili: disidratazione, ringiovanimento cutaneo, crio-tonificazione, rughe, macchie, cicatrici post-acne, pelli impure e asfittiche.

THE FACE LAB

by **Asclepion**

WATERPEEL


WP

AZIONI:

- Peeling superficiale, medio e profondo
- Veicolazione transdermica di cosmetici micronizzati
- Linfodrenaggio

EFFETTI:

- Rigenerazione degli strati superficiali della pelle
- Idratazione ed ossigenazione cutanea
- Riattivazione del microcircolo cutaneo
- Accelerazione del processo riparatore
- Drenaggio linfatico
- Detossinazione

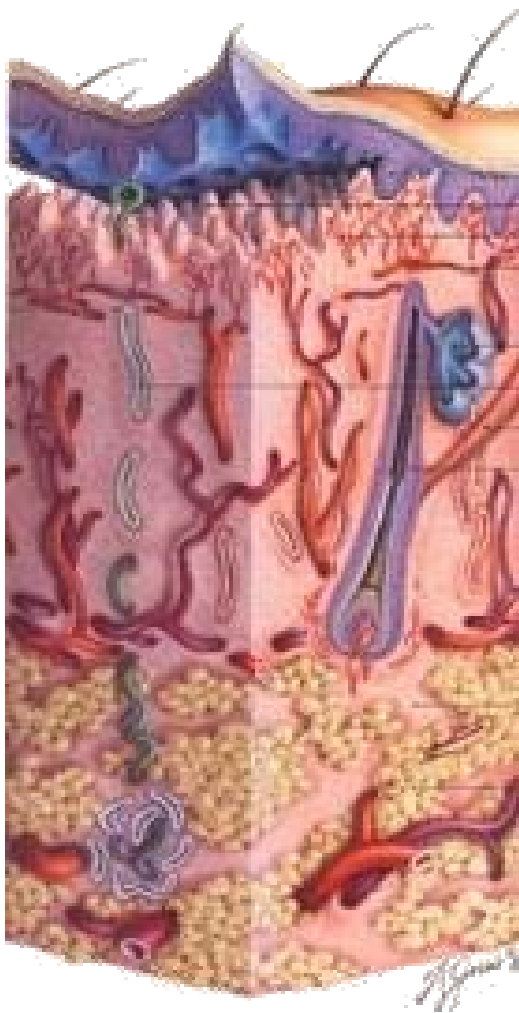

THE FACE LAB

by **Asclepion**

WATERPEEL



MANIPOLI:

- 1 Unico Manipolo
- 2 livelli di pressione
- Due applicatori:
 - 1 uscita 0,2mm
 - 3 uscite 0,13 mm



Ergonomici, leggeri, pratici, per consentire una facile interazione con ogni parte del viso, in tempi rapidi.

THE FACE LAB

by **Asclepion**

RADIOFREQUENZA




Le onde elettromagnetiche ad alta frequenza radio ringiovaniscono la struttura del derma e combattono in maniera estremamente efficace l'invecchiamento e il rilassamento cutaneo.

Inestetismi trattabili: viso, contorno occhi, contorno labbra, collo, décolleté, mani.

THE FACE LAB

by **Asclepion**

RADIOFREQUENZA

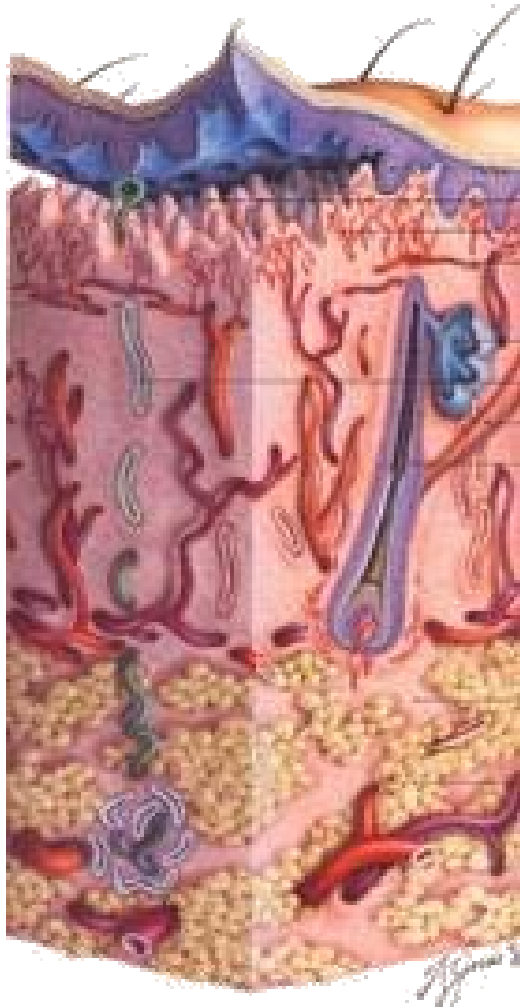

RF

AZIONI:

Denaturazione del collagene tramite rottura dei legami intramolecolari e accorciamento della tripla elica proteica.

EFFETTI:

Effetto immediato:

Collagene più corto e più spesso

→ Effetto tensore visibile e palpabile

SKIN TIGHTENING

Effetto tardivo

Lo Shock termico produce sui fibroblasti un incremento della produzione di collagene fisiologico

→ Aspetto più tonico

THE FACE LAB

by **Asclepion**

RADIOFREQUENZA



MANIPOLI:

- **2 Manipoli:**

 - S - 3x15x5 mm (standard)

 - M - 5x15x5 mm (optional)

- **Frequenza:** 1MHz; 0,75MHz

- **Potenza:** max 8W (con limite densità); max 22 W (senza limite densità).

- **Durata impulso:** fino a 6s


- **Parametri aggiustabili:** potenza, durata, impulso, vacuum, frequenza.

THE FACE LAB

by **Asclepion**

RADIOFREQUENZA ASCLEPION

- È una radiofrequenza **bipolare parallela**
- La funzione **vacuum** genera un'aspirazione continua
- Il passaggio delle onde elettromagnetiche avviene solo nella zona target selezionata
- Le onde passano da un elettrodo all'altro, attraversando il derma e attivando il meccanismo di denaturazione del collagene

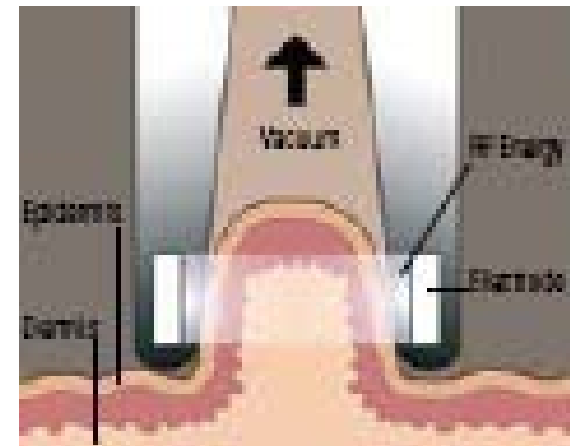

Caratteristica unica

- Costante monitoraggio del voltaggio:
 - Auto-regolazione della potenza per gestire costantemente un sicuro trattamento
 - Se una minor quantità di pelle è trattata, una minore quantità di energia è rilasciata

THE FACE LAB

by **Asclepion**

ULTRASUONO



Dispositivo ad ultrasuono la cui vibrazione induce l'oscillazione delle particelle dei tessuti. Attiva un micro massaggio e crea un aumento della temperatura locale. Migliora il trofismo aumentando così l'assorbimento dei principi attivi.

Inestetismi trattabili: disidratazione, ringiovanimento cutaneo, rughe, macchie, ispessimenti, cicatrici post acne, pelli impure e asfittiche, pelli sensibili/couperose.

THE FACE LAB

by **Asclepion**

ULTRASUONO



US

AZIONI:

- Termica
- Aumenta il drenaggio, migliora il trofismo
- Chimica
- Riorganizzazione della sequenza degli aminoacidi delle proteine
- Meccanica
- Oscillazione delle particelle dei tessuti con effetto massaggio
- Sonoforesi
- Veicolazione omogenea di preparativi positivi, negativi e neutri

EFFETTI:

- Idratazione
- Miglioramento del trofismo
- Riattivazione del microcircolo cutaneo
- Riequilibrio delle funzionalità della ghiandola sebacea
- Rigenerazione degli strati del derma papillare, reticolare, ipoderma superficiale
- Attenuazione della profondità delle rughe e delle cicatrici

THE FACE LAB

by **Asclepion**

ULTRASUONO



MANIPOLI:

- **2 Manipoli:**
 - S – 1 cm² (standard)
 - M - 4 cm² (optional)
- **Frequenza:** 1MHz; 3MHz
- **Potenza:** max. 3W/cm²
- **Duty Cycle:** continuo, 1:2, 1:5, 1:10



THE FACE LAB

by **Asclepion**

INFRAROSSO



Dispositivo a sorgente infrarossa per il riscaldamento sostenuto, omogeneo e progressivo dell'epidermide e del derma con raffreddamento continuo e protettivo. Migliora la grana della pelle, dell'incarnato e riduce i pori dilatati. Efficace nell'attenuazione dei segni del tempo.

Inestetismi trattabili: ringiovanimento cutaneo, rughe, ispessimenti, cicatrici post acne, pelli impure e asfittiche, rilassamento cutaneo, atonia.

THE FACE LAB

by **Asclepion**

INFRAROSSO

AZIONI:

- Migliora la qualità del derma
- Migliora l'aspetto della cute
- Stimola l'azione del collagene

IR

EFFETTI:

- Rivitalizzazione delle cellule
- Aumento della permeabilità dei micro capillari
- Riduzione dei pori dilatati
- Attenuazione dei segni del tempo
- Stimolazione della produzione di collagene ed elastina
- Miglioramento della qualità e densità del derma
- Aumento della luminosità e della grana dell'epidermide
- Aumento del trofismo e dell'ossigenazione superficiale e profonda



THE FACE LAB

by **Asclepion**

INFRAROSSO



MANIPOLO:

- Spot: 6,2 cm²
- Lunghezza d'onda: 650 nm – 1800 nm
- Sistema di raffreddamento dinamico

Grazie per l'attenzione.



EMMECI
Quattro
www.emmeciquattro.com

EMMECI 4 S.r.l.

Via Traversante San Leonardo, 13/A

43122 Parma

info@emmeciquattro.com